

Eclipse Boot®

Super absorbent leg wrap dressing

Instructions for use

Advancis
Medical

Eclipse Boot®

Super saugfähige Beinwundauflage

GER

Produktbeschreibung

Eclipse Boot® ist eine super saugfähige Wundauflage für den sicheren Gebrauch am Bein zur Aufnahme von Wundexsudat. Die Auflage besteht aus einem Gewebe aus Polyester und Viskose für schnellen Dochteffekt und einer Schicht hochsaugfähiger Kristalle in einer mechanischen Zelluloseverbindung. Die beige Schutzschicht aus Polyethylen ist stark atmungsaktiv, bietet eine Barriere gegen Viren und Bakterien und verhindert gleichzeitig das Durchnässen.

Indikation

Mittel bis stark nässende Wunden: Unterschenkelgeschwüre, oberflächliche Wunden, Druckgeschwüre, arterielle Geschwüre, nässende Beinwunden, diabetische Geschwüre.

Gegenanzeigen

Arterienblutungen und stark blutende Wunden.

Gebrauchsanleitung


Auflage vollständig aufrollen, die weiße Seite nach oben, die Ferse auf das kleine Dreieck legen, wobei die Spitze des Dreiecks zum Patienten zeigt. Nach und nach über den Fuß legen, die kleineren Seiten nach links und rechts, und mit Pflastern fixieren. Dann die größeren Seiten, eine nach der anderen, um das Bein legen und ebenfalls mit Pflastern fixieren. Eclipse Boot® kann auch unter Kompression verwendet werden.

Wie oft sollte man wechseln?

Die Tragezeit hängt von der Exsudatmenge ab. Täglicher Wechsel kann angezeigt sein. Eclipse Boot® kann aber bis zu 7 Tage verbleiben. Auf Grund der hervorragenden Saugfähigkeit der Wundauflage kann diese schwer werden und gewechselt werden müssen.

Entsorgung

Als klinischer Abfall zu entsorgen.

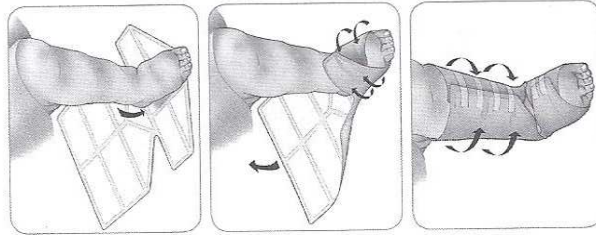

STERILE EO



CE 0086