

# TEP-Protect Arthrodesenkissen B-A-L-S

Baumeister-Anti-Luxations-Sitzerhöhung mit textilem Bezug und Tragegriff

Gebrauchsmusterschutz-Nummer - 203 05 656.6 -

**Techn. Beschreibung:** Zweilagiger Verbundschaumstoff, oben Schaumstoff RG 30, unten RG 75; Maße 45x45x10 cm (nur 700 g) bzw. 45x45x14 cm (nur 760 g) mit besonderem anatomischen Zuschnitt zur Sitzerhöhung und zur Abspreizung der Oberschenkel, mit textilem Bezug, Tragegriff und Schultertragegurt (z. B. für Gehstützenbenutzer).

**Wirkungsweise, Funktion:** Durch die Benutzung dieser anatomisch speziell zugeschnittenen Sitzerhöhung wird erreicht, dass die Sitzhöhe herkömmlicher Sitzgelegenheiten derartig erhöht wird, dass der Flexionswinkel des Hüftgelenkes 80° nicht übersteigt und der Benutzer trotzdem mit beiden Beinen Bodenkontakt behält. Gleichfalls wird durch den Spreizsteg eine diskrete Abspreizung bewirkt; hierdurch wird der Gefahr der Luxation der frisch eingesetzten Hüft-TEP deutlich entgegengewirkt. Durch diese Sitzerhöhung wird dem Benutzer das Hinsetzen und Wiederaufstehen erleichtert. Gleichfalls erfährt das Becken eine leichte Kippung nach vorne und der Benutzer sitzt ermüdungsfreier aufrecht und orthopädisch richtig.

**Indikation:** Coxarthrose u. Hüftversteifung (p r a e o p e r a t i v)  
Gonarthrose mit Kniegelenkversteifung  
Status nach Hüft-TEP (p o s t o p e r a t i v)  
Hüftorthesenversorgung mit Flexionslimitierung  $\leq 90^\circ$

## Lieferbare Größen:

Bestell-Code	Größe	Bestell-Code	Größe
300	10 cm Textilbezug	301	10 cm Kunstlederbezug
310	14 cm Textilbezug	311	14 cm Kunstlederbezug

## Anwendungshinweise:

Arthrodesenkissen zur Schonung der Hüft- und Kniegelenke und zur aufrechten Sitzhaltung der Wirbelsäule bei medizinischer Indikation präoperativ und auch postoperativ. Das Arthrodesenkissen ist durch den Tragegriff und den verstellbaren Schultergurt flexibel einsetzbar.

## Rezeptierung:

**1 TEP-Protect Arthrodesenkissen n. Baumeister  
10 cm bzw. 14 cm hoch  
HiMi-Nr. 26.46.01.0000 beantragt**