


# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet

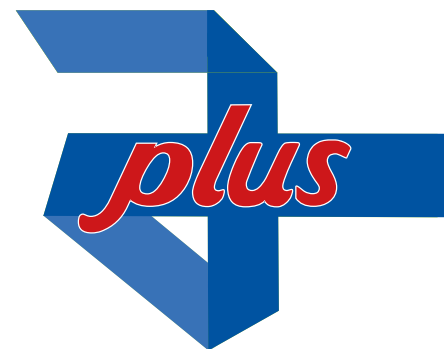

### MyClean® DS Schnelldesinfektion



- Alkoholische Schnelldesinfektion
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid (inkl. M.-terrae) und levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Influenza-/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gemäß aktueller RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Für die Tränkung von Tüchern geeignet
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- VAH-gelistet




#### Anwendung:

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von alkohol- und wischbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten sowie Gegenständen in Kliniken, Praxen, patientennahem Umfeld (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.). Materialbeständigkeit ggf. an unauffälliger Stelle prüfen. Flächen vollständig abwischen und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Ggf. mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen.

#### Ausführungen:

##### MyClean® DS – Schnelldesinfektion

| Artikelbeschreibung | Duft             | Pack.-Inhalt | Art.-Nr. | EAN           | PZN      | Pack/VE |
|---------------------|------------------|--------------|----------|---------------|----------|---------|
| Schnelldesinfektion | Orange           | 10L          | 79617    | 4046153116256 | 10297739 | 1       |
| Schnelldesinfektion | Lemon            | 10L          | 79618    | 4046153116270 | 10305858 | 1       |
| Schnelldesinfektion | Pfirsich         | 10L          | 79619    | 4046153116294 | 10305864 | 1       |
| Schnelldesinfektion | Apfel            | 10L          | 79620    | 4046153116317 | 10305870 | 1       |
| Schnelldesinfektion | Vanille          | 10L          | 79621    | 4046153116232 | 10305841 | 1       |
| Schnelldesinfektion | Sun              | 10L          | 79622    | 4046153115747 | 10305835 | 1       |
| Schnelldesinfektion | Sunrise          | 10L          | 79652    | 4046153120000 | 11092376 | 1       |
| Schnelldesinfektion | Blue Lagoon      | 10L          | 79653    | 4046153120024 | 11092382 | 1       |
| Schnelldesinfektion | Tropical Beach   | 10L          | 79654    | 4046153120048 | 11092399 | 1       |
| Schnelldesinfektion | Granat-<br>apfel | 10L          | 79697    | 4046153125302 | 14352725 | 1       |

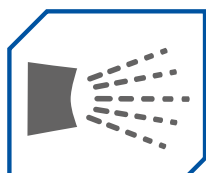

MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1–7  
29643 Neuenkirchen – Germany

TD-MyClean-DS-Schnelldesinfektion-Duft-20181207

# Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



## MyClean® DS Schnelldeinfektion

### Einwirkzeiten:

|                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bakterizid, levurozid (EN 16615, hohe Belastung):                                                    | 1 Minute    |
| Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, TBC (inkl. M.-terrae) (EN 13624, EN 13727, VAH, hohe Belastung): | 1 Minute    |
| Adeno-Viren (EN 14476, geringe Belastung):                                                           | 15 Minuten  |
| Noro-Viren (EN 14476, geringe Belastung):                                                            | 5 Minuten   |
| Rota-Viren (EN 14476, geringe Belastung):                                                            | 30 Sekunden |
| Vaccinia Elstree/BVDV (DVV/RKI) (10 % FKS):                                                          | 30 Sekunden |
| SV40 (DVV/RKI, geringe Belastung):                                                                   | 5 Minuten   |

**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten:  
Wirkstoffe: 43 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid


**Qualitätssicherung:** MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, Biozidverordnung  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungstufen  
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

**Biozid-Nr.:** N-63770

**Verwendbarkeit:**  3 Jahre

**Standzeit:**  nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

**Symbole:**      Achtung

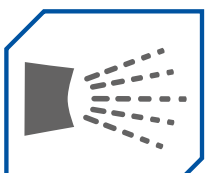

MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen – Germany

TD-MyClean-DS-Schnelldeinfektion-Duft-20181207