


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

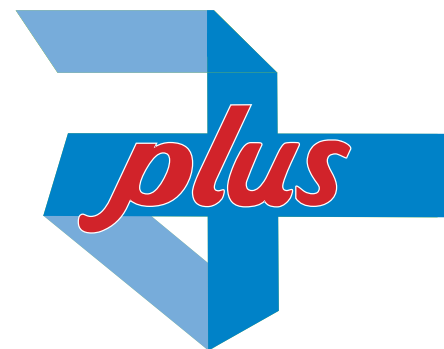

MyClean® FD

Flächendesinfektion

- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS
- Wirksam gegen Noro-, Rota- und SV40-Viren
- MRSA wirksam und getestet
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Sehr wirtschaftlich aufgrund niedriger Anwendungskonzentrationen
- Sehr gute Materialverträglichkeit

Anwendung: Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar, insbesondere Geräteoberflächen und Gegenständen im patientennahen Umfeld wie auch Oberflächen in der Industrie und Lebensmittelbereichen geeignet.

Ausführungen: **MyClean® FD – Flächendesinfektion**

Artikelbeschreibung/ Article Description	Duft/ Aroma	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	PZN	Pack/ VE
Flächendesinfektion/ Surface Disinfection	Neutral/ neutral	1 Liter/ 1 litres	79630	4046153116539	10305999	14
Flächendesinfektion/ Surface Disinfection	Neutral/ neutral	5 Liter/ 5 litres	79631	4046153116553	10306007	2
Flächendesinfektion/ Surface Disinfection	Neutral/ neutral	10 Liter/ 10 litres	79632	4046153116577	10306013	1

Wirksamkeit:

Wirksamkeiten gemäß EN/Methoden der VAH/DGHM:	
Bakterizid, levurozid (EN 13624, EN 13727, hohe Belastung):	0,5 % – 5 Minuten
Bakterizid, levurozid (EN 16615; hohe Belastung):	0,5 % – 1 Minute
Mykobakterizid EN 14348 (M.-terrae und M. avium, hohe Belastung):	2,0 % – 30 Minuten 1,0 % – 1 Stunde
Viruswirksamkeiten (EN14476):	
Begrenzt Viruzid PLUS:	4,0 % – 1 Stunde
Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV; Influenzaviren; hohe Belastung):	3,0 % – 5 Minuten 1,0 % – 30 Minuten
Adeno-, Noroviren (hohe Belastung):	4,0 % – 1 Stunde
Rotaviren (ohne Belastung):	1,0 % – 30 Minuten
SV 40 (hohe Belastung):	2,0 % – 1 Stunde

Zusammensetzung: In 100 g sind enthalten:
Wirkstoff: 2,0 g 2-Phenoxyethanol; 7,0 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 5,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, HACCP
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa


Verwendbarkeit: ⏰ 3 Jahre

Standzeit: 🗓️ 12 M nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:



GEFAHR

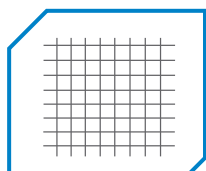

MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1–7
29643 Neuenkirchen – Germany

TD-MyClean-FD-Flächendesinfektion-20190612