

THERAKIT C 25X15 PT220 10

THERAKIT Carbon 15x25cm PU-Schaum rund Drm.220 mm

PZN: 17314872

Inhalt: 2X10 St

Hersteller: L+F Medizinprodukte GmbH

Zweckbestimmung

Zorflex aus 100 % reinem Aktivkohletuch bietet eine effektive Barriere gegen mikrobielle Kontamination und schützt die Wunde vor invasiven Mikroorganismen, die eine Heilung der Wunde verhindern können. Zorflex aus 100 % reinem Aktivkohletuch ist auch wirksam gegen Mikroorganismen, die bereits in der Wunde vorhanden sind. Die antimikrobiellen Barriereigenschaften von Zorflex sind mindestens 7 Tage wirksam. Zorflex reduziert belegtermaßen Geruch, Schmerzen und Exsudat. Zorflex ist auch leitfähig. Zorflex kann entweder trocken oder mit sterilisiertem Wasser befeuchtet angewendet werden. Anwendungsgebiete: Zorflex ist angezeigt als antimikrobielle Wundauflage auf exsudierenden oberflächlichen und tiefen Wunden, wie z. B.: Wundhöhlen und Traumawunden, Operationsstellen, exulzierenden Karzinomen, Druckgeschwüren, Unterschenkelgeschwüren, diabetischen Geschwüren, Transplantatentnahmestellen und Transplantationsstellen. Gegenanzeigen: Nicht zur Anwendung auf trockenen Wunden, da der Verband dadurch an der Wunde kleben könnte. Bei Vorhandensein von Exsudat trägt LIQUEEL PT dazu bei, ein feuchtes Wundmilieu aufrechtzuerhalten, um den natürlichen Heilungsprozess zu unterstützen. LIQUEEL PT ist indiziert für die Behandlung von leicht bis mäßig exsudierenden Wunden, wie z.B. Druckgeschwüre, venöse und arterielle Beingeschwüre, nicht infizierte diabetische Fußgeschwüre, Verbrühungen/ Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Schürf-, Riss- und kleine Schnittwunden. LIQUEEL PT kann unter Kompressionsbehandlung genutzt werden. Wegen seiner guten Hafteigenschaften sollte das Produkt vorsichtig entfernt werden, wenn die Haut empfindlich ist (z.B. Pergamenthaut). LIQUEEL PT sollte gewechselt werden, wenn der Verband mit Exsudat gesättigt ist oder Exsudat austritt. Andernfalls kann der Verband bis zu 7 Tagen auf der Wunde belassen werden. LIQUEEL PT ist kontraindiziert bei infizierten Wunden, bei tiefen Wunden, bei stark blutenden Wunden sowie bei Verbrennungen größer 2. Grades. LIQUEEL PT sollte bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Polyurethan nicht zur Anwendung kommen.

Zusammensetzung

10 x Wundauflage aus 100 % Aktivkohlefasern und 10 x steriler, saugfähiger, selbsthaftender, weicher Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silikonbeschichtung. Er besteht aus einer weichen Wundkontaktschicht und einer Polyurethanschaumschicht mit hoher Absorptionskapazität und einer dampfdurchlässigen Außenschicht aus Polyurethanfolie.