



N1 ZECKEN VEREISUNGSMITTEL

Nur zur äußerlichen Anwendung

Nur für die Entfernung von Zecken bei Personen ab 4 Jahren



Lies vor der Anwendung sorgfältig die Gebrauchsanweisung.
Verwende das Produkt ausschließlich gemäß den Anweisungen.



Den Dispenser nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist.

INHALT

1 Dispenser zu 38 ml mit dauerhaft befestigter Applikatorkappe; enthält Dimethylether (DME)

1 Karte zur Zeckenentfernung

1 Gebrauchsanweisung

PRODUKTBESCHREIBUNG

N1 Zecken Vereisungsmittel tötet Zecken schnell und sicher ohne Berührung, und ermöglicht eine einfache Entfernung der Zecke aus der Haut. Die Entfernung der Zecke sollte so schnell wie möglich nach dem Zeckenbiss erfolgen, um potentielle Risiken im Zusammenhang mit der Übertragung von Infektionskrankheiten durch die Zecke zu reduzieren.

WAS SIND ZECKEN?

Zecken sind Parasiten, die sich von Tier- und Menschenblut ernähren. In Europa gibt es verschiedene Zeckenarten. Der Gemeine Holzbock (*Ixodes Ricinus*) ist die am häufigsten vorkommende Zeckenart. Der Gemeine Holzbock kann verschiedene Erkrankungen auf Menschen und Tiere übertragen.

GEGENANZEIGEN

N1 Zecken Vereisungsmittel darf in folgenden Fällen nicht angewendet werden:

- Bei einer bestätigten Krebsdiagnose bzw. einer Krebsbehandlung
- Bei Zecken in Augennähe und im Gesicht. Auf der Brust, im Genitalbereich oder auf dem Gesäß
- Auf stark oder dunkel pigmentierter Haut aufgrund des Risikos einer Depigmentierung
- Auf gereizter, infizierter oder empfindlicher Haut
- Bei Bestehen einer Überempfindlichkeit oder Allergie gegenüber extremer Kälte (Kälteurtikaria)
- Bei Diabetes und Personen mit Kreislaufstörungen (Raynaud-Syndrom)
- Bei mit Immunsuppressiva behandelten Personen oder bei bestätigter Diagnose von Autoimmun- oder Kollagenerkrankungen
- Bei einer HIV-Infektion
- Bei mit Gerinnungshemmern behandelten Personen und Patienten mit Hämophilie
- Bei Kindern unter 4 Jahren



GEBRAUCHSANWEISUNG ZECKENKARTE

1. Überprüfe die Größe der Zecke mit der Lupe in der Zeckenkarte. Wenn es sich um eine kleine Zecke (<2 mm) handelt, verwende bitte die kleine Einkerbung an der Karte für die Zeckenentfernung. Die meisten Zecken, auch die kleineren, können mühelos mit der größeren Einkerbung entfernt werden.
2. Eine freie Sicht auf die Zecke sollte gewährleistet sein.
3. Positioniere die Karte in Hautnähe mit der Einkerbung in Richtung der Zecke.
4. Bewege die Vorrichtung zur Zeckenentfernung in Hautnähe auf die Zecke zu, so dass diese in den schmalen Bereich der Karte gelangt.
5. Bewege die Vorrichtung ruhig auf die Zecke zu, bis diese im schmalen Bereich der Karte stecken bleibt.
6. Die Zecke wird abgelöst und bleibt in der Karte für die Zeckenentfernung stecken.
7. Desinfiziere die Wunde mit etwas Alkohol und markiere die Stelle des Zeckenbisses.
8. Desinfiziere die Vorrichtung zur Zeckenentfernung mit heißem Wasser oder Alkohol.

NACH DER BEHANDLUNG

- Die Behandlung kann eine Blasenbildung verursachen. In diesem Fall die Blase nicht durchstechen.
- Die behandelte Stelle nicht aufpicken oder kratzen.
- Halte den behandelten Bereich trocken und sauber, um eine Infektion zu vermeiden.
- Du kannst wie üblich schwimmen, dich waschen, baden und duschen.
- Behalte die Stelle des Zeckenbisses in Erinnerung. Markiere die Stelle mit einem Stift oder mache ein Foto.
- Überprüfe deinen Körper regelmäßig und verwende einen Spiegel. Konsultiere bei Beschwerden wie Rötung, Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, ringförmigem Hautausschlag (die Tage und sogar Wochen anhalten können) eine medizinische Fachkraft. Erwähne unbedingt, dass du von einer Zecke gebissen wurdest.

WARNHINWEISE/VORSICHTSMASSNAHMEN

- Hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen und sonstigen Zündquellen fernhalten
- Rauchen verboten
- Nur zur äußerlichen Anwendung
- Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung
- Nicht in eine offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen
- Den Behälter keinen Temperaturen oberhalb von 50 °C aussetzen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Das Spray nicht inhalieren
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Nicht in Augen sprühen, da dies zu Erfrierungen und Blindheit führen kann
- Das Produkt kann Erfrierungen, Depigmentierung und Narbenbildung verursachen, wenn es nicht in Übereinstimmung mit diesen Hinweisen zur Anwendung eingesetzt wird
- Konsultiere bei Schwangerschaft und in der Stillzeit eine medizinische Fachkraft
- Konsultiere bei Beschwerden wie Rötung, Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, ringförmigem Hautausschlag (die Tage und sogar Wochen anhalten können) eine medizinische Fachkraft. Erwähne unbedingt, dass du von einer Zecke gebissen wurdest

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorsicht! Entferne auf keinen Fall die dauerhaft befestigte Applikatorkappe vom Behälter.



Positioniere die Öffnung des Applikators etwa 1 cm oberhalb der Zecke. Vorsicht: Berühre weder die Haut noch die Zecke mit dem Applikator! Halte den Aerosol-Behälter möglichst vertikal.



Betätige den Knopf für die Freisetzung der Kryoflüssigkeit etwa 1 cm oberhalb der Zecke 4 Mal. Falls sich die Zecke immer noch bewegt, wiederhole den Vorgang nach 10 Minuten.



Nach der Vereisung sollte die Zecke abfallen. Sollte dies nicht der Fall sein, entferne die Zecke vorsichtig mit der enthaltenen Karte zur Zeckenentfernung.

Hinweis! Möglicherweise treten während und unmittelbar nach der Behandlung ein leichter Schmerz oder Kribbeln auf. Dies legt sich nach und nach.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

- Die Kryotherapie kann zur Depigmentierung (hellen Flecken) oder zur Überpigmentierung (dunklen Flecken) auf der Haut führen. Diese bilden sich zurück.
- Blutung
- Blasenbildung
- Narbenbildung, wenn die Vereisung länger angewendet wird, als in den Hinweisen erläutert.
- Vorübergehende Beschwerden wie Schmerzen oder Kribbeln
- Bei Fragen zu Infektionen bzw. Komplikationen eine medizinische Fachkraft konsultieren

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

- Kühl und trocken lagern. Den Behälter keinen Temperaturen oberhalb von 25° C aussetzen
- Entsorge den Inhalt/den Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften

Hergestellt für: pharmedix GmbH
Ballindamm 11, 20095 Hamburg
www.N1.de



Koninklijke Utermöhlen NV
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega
Niederlande

Inhalt: 38 ml Dimethylether

CE 0344 MD



Fragen zum Produkt?
Scan mich für eine
pharmazeutische
Beratung.