

Gebrauchsanweisung Frischen Harn in einem Behälter sammeln. Mit trockenen Fingern einen Teststreifen abreißen. Teststreifen 1 Sek. in den Urin eintauchen, herausziehen und überschüssige Flüssigkeit abschütteln. Je nach pH-Wert verändert der Streifen seine Farbe. Innerhalb von 2 Min. Farbe mit der Farbskala vergleichen. Wert ablesen, der der Verfärbung des Teststreifens am nächsten kommt (Ablesegenauigkeit: $\pm 0,1$ pH). Benutzte Teststreifen in den Hausmüll geben. Für Bewertungen fachkundigen Rat einholen. **Hinweis** Die Brauchbarkeit von unbenutzten Teststreifen wird durch etwaige Verfärbungen nicht beeinträchtigt.

CE 0197

Rev. 2017-10

LOT


XXXXXXX



XXXXXXX

ⓧ Nicht wiederverwenden

15 °C

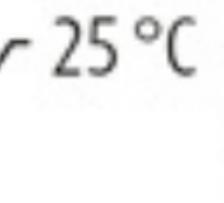

25 °C

Trocken und vor Licht geschützt aufbewahren!



4 260405 950027

PZN: 2067497



Hersteller:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren
Vertrieb: MADENA GmbH & Co. KG, Stöckheimer Weg 1, 50829 Köln

BasenCitrato *Pur*

Für die Eigenanwendung.

Gebrauchsanweisung beachten!



IVD



26 Basenstreifen pH 5,9 – 7,7 Zur Kontrolle des Urin-pH