

RECA care - Gebrauchsanweisung



Amalienstr. 70, 90763 Fürth
Tel.: 0911 740 66 20
Fax: 0911 740 66 21

Liebe Kundin, lieber Kunde,
in wenigen Minuten können Sie sich wieder frei und sauber fühlen

Hier die einzelnen Schritte:



Waschen Sie sich die Hände und entfernen Sie die Folie, wickeln Sie den Rückholfaden ab

Weichen Sie **RECA care** kurz in warmem Wasser ein und drücken Sie den Tampon danach aus


Nach Wunsch bestreichen Sie den Tampon mit Gleitgel - cremen Sie den Stiel des Einführstabes ebenfalls ein (dadurch lässt sich der Tampon leichter vom Stiel lösen)

Setzen Sie den Tampon auf den Einführstab

Nehmen Sie eine bequeme Position ein (Rückenlage oder stellen Sie ein Bein hoch, z.B. Stuhl oder Toilette)

Führen Sie den Tampon in den Darm ein und ziehen Sie danach den Einführstab heraus (bei der Berührung des Schließmuskels entsteht unter Umständen ein Kneifreflex, bitte warten Sie ca. 8-10 Sekunden bis der Reflex abklingt und führen den Tampon dann ein)

Sie können **RECA care** jederzeit mit dem Rückholfaden während des Toilettenganges entfernen und im Hausmüll entsorgen

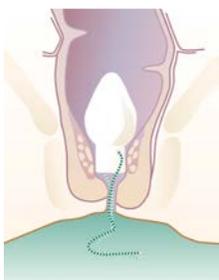

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Bitte beachten Sie:

Wenn Sie möchten, fixieren Sie den Faden mit einem hautfreundlichen Pflaster

Entfernen Sie den Tampon nach spätestens 20 Stunden

Beim Wasserlassen muss **RECA care** nicht entfernt werden

Während des Schwimmens muss der Tampon nicht entfernt werden

RECA care ist nur für den einmaligen Gebrauch geeignet

Größen und Artikelnummern:

Art. Nr.	20/3	20/4	40/24	40/30	40/35	44/24	44/35	30/1
Ø, Länge in mm	25/52	35/60	23/45	28/50	33/55	23/45	33/56	25/115

Material	PVA Schaumstoff	
Fäden	Kunststoff/Baumwolle	
Packungsgrößen	50 oder 100 Stück	
Hilfsmittel - Nr.	15.25.17.0003 + 0004	CE 1275



Gebrauchsanweisung beachten



Einmalgebrauch



haltbar bis 2018

Gegenanzeigen:

- Blutungen ungeklärter Herkunft
- Akute Entzündungen im Darmbereich
- Unklare Schmerzen im Bauchraum

Nebenwirkungen:

Bei der Anwendung von **RECA care** kann es gelegentlich zu einem Druckgefühl kommen. Dieses verschwindet normalerweise nach 3-4 Tagen und sicher nach Entfernen des Tampons.

Warnung:

Wenn während der Verwendung von **RECA care** plötzlich Fieber, Durchfall, Erbrechen und Schwindelgefühle oder Hautausschlag auftreten, entfernen Sie den Tampon bitte sofort und suchen einen Arzt auf

Bitte halten Sie sich an die Gebrauchsanweisung. RECA Med übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden bei unsachgemäßer Anwendung. Bei Mehrfachanwendung könnten die hygienischen Bedingungen nicht mehr gegeben sein.