

Mira 2 Ton Plaque Einfärbetabletten, 10 Stück.

Nach dem Zähneputzen sollte eine Färbetablette zerkaut und dann wieder ausgespuckt werden. Mittels eines Mundspiegels kann nun das Putzergebnis kontrolliert werden.

Bei ungenügender Putzleistung zeigen sich rote Verfärbungen auf den Zähnen, die die jüngere Plaque sichtbar machen.

Besonders gut sollten die Stellen geputzt werden, die eine blaue Verfärbung zeigen, denn dort befindet sich Plaque, die schon älter als 3 Tage ist.

Die Verfärbungen lassen sich durch anschließend erneutes Zähneputzen wieder entfernen.

Die Färbetabletten sind frei von Erythrosin und basieren auf Lebensmittelfarben.

PZN 4005394 / Art. 611

Für regelmäßige Kontrollen empfiehlt sich die 50 Stück-Packung: PZN 4005247.