

**Waxo Bienenwachspack**

Artikel Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Größe	EAN
MED1001188	waxo Bienenwachs Wickel Kleinkind	2 Stk.	20 x 30 cm	4250201202635
MED1001516	waxo Bienenwachs Wickel Kleinkind	10 Stk.	20 x 30 cm	4250201202642
MED1001189	waxo Bienenwachs Pack	10 Stk.	50 x 30 cm	4250201202659
MED1001190	waxo Bienenwachs Pack	10 Stk.	70 x 30 cm	4250201202666

**Wärmekissen – Heilwolle**

MED1000169	Kirschkernkissen rot	1 Stk.	22 x 22 cm	4250201204301
MED1000698	Kirschkernkissen rot	1 Stk.	40 x 20 cm	4250201204318
MED1000699	Kirschkernkissen rot	1 Stk.	40 x 30 cm	4250201204325
MED1000700	Kirschkernkissen rot	1 Stk.	40 x 40 cm	4250201201249
MED1000815	Kirschkernkissen rot	1 Stk.	40 x 60 cm	4250201204356
MED1001427	Quarzmineral Wärmesäckchen	1 Stk.	28 x 33 cm	4250201202536
MED1001016	Heilwolle	1 Stk.	20 g	4250201201225
MED1001240	Heilwolle	1 Stk.	50 g	4250201201232
MED1001239	Heilwolle	1 Stk.	100 g	4250201201249

**Haut- & Massage Öle**

MED1000052	Jojoba Öl 100% naturrein	1 Stk.	100 ml	4250201201331
MED1001080	Sesam Öl	1 Stk.	100 ml	4250201202314
MED1001242	Argan Öl	1 Stk.	100 ml	4250201200372
MED1001075	Mandel Öl	1 Stk.	100 ml	4250201201553
MED1000247	Sanddorn Hautöl Baby	1 Stk.	100 ml	4250201202086
MED1001081	Weizenkeim Öl	1 Stk.	100 ml	4250201202697
MED1001236	Rosmarin Hautöl	1 Stk.	100 ml	4250201202055
MED1000373	Massage Öl (Jojobaöl) neutral	1 Stk.	100 ml	4250201201621
MED1000377	Massage Öl (Jojobaöl) Jasmin	1 Stk.	100 ml	4250201201591
MED1000376	Massage Öl (Jojobaöl) Rose	1 Stk.	100 ml	4250201201645
MED1000379	Massage Öl (Jojobaöl) Ylang Ylang	1 Stk.	100 ml	4250201201683

**Ohrkerzen**

MED1000174	Ohrkerzen Bienenwachs	2 Stk.		4250201201881
MED1000175	Ohrkerzen Bienenwachs	10 Stk.		4250201201898
MED1001041	Ohrkerzen Bienenwachs	50 Stk.		4250201201904
MED1001355	Ohrkerzen Startset / Geschenkset	1 Stk.		4250201201911



CE

Made in Germany

**M E D E S I G N**

 medesign I.C. GmbH · Dietramszellerstr. 6 · D-83623 Dietramszell  
 Phone +49(0)8027-907 38-0 · Fax +49(0)8027-907 38-27  
 info@medesign.de · www.medesign.de

# waxo Bienenwachspack

... Therapie und Wellness mit sanfter Wärme.

Wärme spricht Menschen innig und direkt an,  
sie fördert Eigenkräfte und Selbstbewusstsein.

Wärmetherapie mit dem waxo Bienenwachspack. Wärme ist die  
Grundlage menschlichen Lebens. In der Therapie kann sie Erstarrungen lösen  
und Schmerzen lindern, den Zugang zu Menschen erleichtern, die  
Wirksamkeit einer Therapie begünstigen und vertiefen.

Bienenwachs und Seide sind die Bestandteile des waxo Bienenwachspacks.

Es werden Rohstoffe höchster Qualität verwendet.

Ohne Duft- und Konservierungsstoffe.



SP 00494.000 PRN 21045

**M E D E S I G N**  
 Dietramszell · Dubai · München



# waxo Bienenwachspack

## Gebrauchsinformation

Die Wärmetherapie mit dem waxo Bienenwachspack ist zur Wiederherstellung und Harmonisierung der Wärmeverhältnisse im menschlichen Körper, sowie zur Hautpflege und Wellness. Das Bienenwachspack ist für Kinder und Erwachsene geeignet.

Die Wärmequalität in den Hautschichten und der Muskelschale (quergestreifte Muskulatur) des Menschen lässt sich topografisch nicht fixieren, sondern fließt mit Lymphstrom bzw. interstitiellem Gewebewasser. Dieser physiologische Wärmefluss aktiviert das Nerven-Sinnessystem, die Beweglichkeit der Muskulatur und schafft die Voraussetzung für die leistungsadaptierte Funktion. Störungen dieses Wärmeflusses entwickeln Kältezonen in den unterschiedlichsten Arealen. Diese haben bei bestimmten pathophysiologischen Zuständen charakteristische Ausprägungen im Sinne von stagnierenden Kältefeldern. Daraus ergeben sich charakteristische Störungen des neuromuskulären Apparates. Eine Therapiemaßnahme muss in diesen Fällen darin bestehen, den Wärmefluss zu aktivieren.

**Im Wellnessbereich führt die ausgeglichene Wärmeverteilung zu einer Harmonisierung und wohltuenden Entspannung.**

Der waxo Bienenwachspack besteht aus reiner Seide die gleichmäßig mit reinem Bienenwachs und Honigessenze getränkt ist. Es enthält keine Farb-Konservierungsstoffe, Paraffin oder Stearin.

### Anwendungsgebiete / Indikationen

Das Einsatzgebiet der Bienenwachs-Wärmetherapie umfasst die gesamte Physiotherapie, Klinik- und Pflegebereich, sowie die Anwendung im Wellness und im privaten Bereich. Die Bienenwachs-Wärmetherapie eignet sich als Unterstützung bei vielfältigen Beschwerden im Bereich der Therapie akuter und chronischer Schmerzen, chronisch entzündlicher und sklerotisierender Erkrankungen des Bewegungsapparates, oder der Begleiterscheinungen neurologischer Erkrankungen. Im internistischen, sowie gynäkologischen Bereich bietet die Bienenwachs-Wärmetherapie hilfreiche Anwendungsmöglichkeiten. Sie lässt sich auch in der Körpertherapie bei leichten psychischen Beschwerden einsetzen.

### Vorteile der waxo Bienenwachstherapie

- **hygienische, einfache Anwendung**
- **ansteigende / konstante Anwendungstemperatur,**  
dadurch keine Belastung des Patienten
- **natürliche angenehme Materialien**
- **einfache Anwendung**
- **keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten**
- **vielfältige Einsatzbereiche in Therapie und Wellness**

### Nicht verwenden bei

bekannter Allergie gegen Bienenprodukte, großflächigen Hautverletzungen, offenen Wunden und akuten Hauterkrankungen, Durchblutungsstörungen, fieberhaften Erkrankungen, akuten Zuständen nach Traumen, akuten Entzündungen, Wärmeurtikaria, Hypertonie, hochentzündlichen rheumatischen Schüben, schweren Herz-Kreislaufinsuffizienzen.

Eine Anwendung in der Schwangerschaft sollte vorsichtshalber vor der Anwendung mit der Hebamme oder dem Arzt besprochen werden.



### Nebenwirkungen

Nach großflächiger Wärmebehandlung besteht die Möglichkeit einer orthostatischen Dysregulation beim Aufstehen. In diesem Fall soll der Patient vor dem Aufstehen für einige Minuten aufrecht sitzen bleiben.

Bei sehr empfindlichen Patienten ist eine übermäßige Rötung der Haut möglich.

Die waxo Bienenwachspackung führt in sanfter Weise zu ausgeglichener, tiefer Durchwärmung des ganzen Körpers, bewirkt dadurch Entspannung, Beruhigung und Schmerzlinderung und fördert die Selbstregulation. Die Bienenwachspackung muß für jeden Patienten angemessen temperiert sein, was durch den Aufbau der Packung gewährleistet wird.

### Benötigte Materialien

- **waxo Bienenwachspackung**
- **Frottee-Handtuch in entsprechender Größe**
- **Wärmeträger (Kirschkernkissen, Traubenkernkissen, Quarzmineralsäckchen) auf ca. 60°–70°C erwärmen**

### Durchführung

waxo Bienenwachspackung auf den zu behandelnden Körperbereich legen und der Körperkontur anschmiegen. Frottee-Handtuch zwei- bzw. dreilagig über den Bienenwachspack legen, so dass der gesamte Bereich abgedeckt ist. Den heißen Wärmeträger (max. 60°–70°C) auf das Frottee-Handtuch legen. Patient mit geeigneten Decken warm und bequem einpacken. Dauer der Anwendung 20 – 30 Minuten.

**Eine angemessene Nachruhe fördert das Wohlbefinden.**

### Wärmeträger

Als Wärmeträger können Kirschkernkissen, Traubenkernkissen oder Quarzmineralsäckchen verwendet werden. Je nach Art des Wärmeträger, kann er entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung bis auf ca. 60°C erwärmt werden. Zwischen Wärmeträger und Bienenwachsfolie sollte immer ein zweilagiges Pufferhandtuch liegen. Bei Kindern und Erwachsenen kann eine Handtuchlage auch durch Heilwolle ersetzt werden.

### Hinweise

Den heißen Wärmeträger niemals direkt auf die Haut legen. Es könnten Hautschädigungen auftreten. Immer ein Frottee-Handtuch als Puffer verwenden. Den heißen Wärmeträger niemals auf das Bienenwachspack legen. Das Wachs würde schmelzen und es können Hautschädigungen auftreten. Das waxo Bienenwachspack ist bei Temperaturen unter 20°C brüchig, und lässt sich der Körperkontur nicht richtig anpassen.

### Aufbewahrung gebrauchter Bienenwachspacks

Der waxo Bienenwachspack kann mehrmals bei dem selben Patienten verwendet werden. Abhängig von der Anwendungstemperatur kann das Pack bis zu 6 mal verwendet werden. Nach der Anwendung streichen sie das waxo Bienenwachspack glatt, rollen es in ein sauberes Handtuch ein, versehen es mit einem Namensschildchen und lagern es zweckmäßig. Nach der Anwendung kann das waxo Bienenwachspack verblassen, das ist ein natürlicher Vorgang.

**Die Original waxo Bienenwachspacks werden in Handarbeit hergestellt. Kleine Maß- und Farbabweichungen sind möglich.**