

# Sicher Spülen mit dem B. Braun-System

Einfach, schnell, wirtschaftlich



Das Spüllösungsprogramm in  
Ecobag® click, Ecolav® und Ecotainer®

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Ecobag® click

Immer die beste Verbindung ... passt sich jeder Bewegung an

**Spüllösungsbeutel mit innovativem Verschlusssystem: leichtes Konnektieren und 360° Beweglichkeit**

Nur ein kurzes Klicken und der Ecobag® click ist angeschlossen. Fest und kontaminationssicher. Der flexible, drehbare Kopf der Ecoclick®-Überleitgeräte passt sich jeder Bewegung an und erleichtert so die Handhabung. Ein Verhaken oder Verklemmen des Schlauches wird vermieden. Und mit einem leichten Druck auf die Seitenflügel wird der Verschluss wieder gelöst. Der Port verschließt sich sofort vollständig.



Portsystem durch Abdrehen der Verschlusskappe öffnen.



Ecoclick®-Konnektor bis zur Rastung in den Port drücken.



Zum Dekonnektieren Seitenflügel drücken und Ecoclick® herausziehen.



- Komfortables Handling durch 360° flexiblen Drehkopf
- Leichte und sichere Arretierung des Überleitgerätes im Portsystem
- Wiederabdichtende Ports



## Mit sanftem Druck präzise spülen ... und dabei Zeit und Kosten sparen

### Flexibler Spülbehälter für punktgenaue, effiziente Anwendungen

Das weiche Material des Ecolav®-Behälters (Polyethylen) und die Sprühdüse ermöglichen eine punktgenaue Spülung durch sanften Druck der Flasche. Aufgrund der verschiedenen Behältergrößen kann Ecolav® an jede Indikation angepasst werden. Durch die abdrehbare Verschlusskappe wird sofort mit der Anwendung begonnen – ohne Spritze, ohne Nierenschale.



#### Druckanwendung

Ein geringer Druck auf die weiche Flasche bewirkt einen feinen, präzisen Strahl der Spüllösung.



#### Punktförmige Anwendung

Der 30-ml-Minidosis-Behälter erlaubt eine auf den Punkt genaue Anwendung der Spüllösung.



#### Ecolav® Estericlean®

Speziell für die Chirurgie: Ecolav® Estericlean® (500 ml) mit steriler Umverpackung.



- **Zeitersparnis**  
Reduzierter Vorbereitungsaufwand, Verschluss abdrehen, sofort benutzen
- **Kostensparnis**  
Ohne zusätzlichen Materialeinsatz (z.B. Nierenschale, Spritze) anzuwenden



# Ecotainer®

## Alles im Griff ... mit Sicherheit

### Ecotainer® für großvolumige Spüllösungen: sichere Handhabung, kein Verschütten beim Ausgießen

Der Ecotainer® besteht aus unzerbrechlichem, umweltfreundlichem Polypropylen. Er wurde so konzipiert, dass ein Verschütten des Inhalts unabhängig vom Ausgusswinkel nicht möglich ist. So können auch großvolumige Spüllösungen exakt dosiert werden.

Durch die Griff-Taille liegt der Behälter immer fest in der Hand. Besondere Sicherheit bietet der Ecotainer® aufgrund der verschiedenen farbigen Verschlusskappen, die eine schnelle und sichere Zuordnung der unterschiedlichen Spüllösungen ermöglichen:

- Ringer
- NaCl 0,9%
- Aqua



Die farbcodierten Verschlusskappen sind leicht zu öffnen. Und der weiße Versiegelungsring ist eine sichtbare Garantie für die Originalität der Spüllösung.



Die spezielle Konstruktion des Ecotainers hilft, dass beim Ausgießen der Spüllösung kein Tropfen daneben geht – auch bei voll gefülltem Behälter und steilem Ausgusswinkel. Zusätzlich sorgt die Messskala für eine exakte Dosierung je nach Indikation.




- Kein Verschütten – auch bei steilem Ausgusswinkel
- Komfortable Griff-Taille
- Farbige Verschlusskappen
- Transparent und unzerbrechlich



## Überleitsysteme für Spüllösungen (Ecobag® und marktübliche Beutelsysteme)

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Länge 210 cm</b>           | <b>patientenseitiger Konusansatz mit 15 cm Silikonschlauch</b> |
| mit Click Konnektor           | Ecoclick® Nr. 1 einläufig                                      |
|                               | Ecoclick® Nr. 2 zweiläufig, mit Rasterklemmen                  |
|                               | Ecoclick® Nr. 4 einläufig, mit Rücklaufsperr                   |
| mit Spike Konnektor           | Ecospike® Nr. 1 einläufig                                      |
|                               | Ecospike® Nr. 2 zweiläufig, mit Rasterklemmen                  |
|                               | Ecospike® Nr. 4 einläufig, mit Rücklaufsperr                   |
| <b>Länge 330 cm (Arthros)</b> | <b>patientenseitiger Konusansatz mit 15 cm Silikonschlauch</b> |
| mit Click Konnektor           | Ecoclick®-Arthros Nr. 1                                        |
| mit Spike Konnektor           | Ecospike®-Arthros Nr. 1                                        |
|                               | <b>patientenseitiger Luer-Lock-Anschluss</b>                   |
| mit Click Konnektor           | Ecoclick®-Arthros Nr. 2                                        |
| mit Spike Konnektor           | Ecospike®-Arthros Nr. 2                                        |

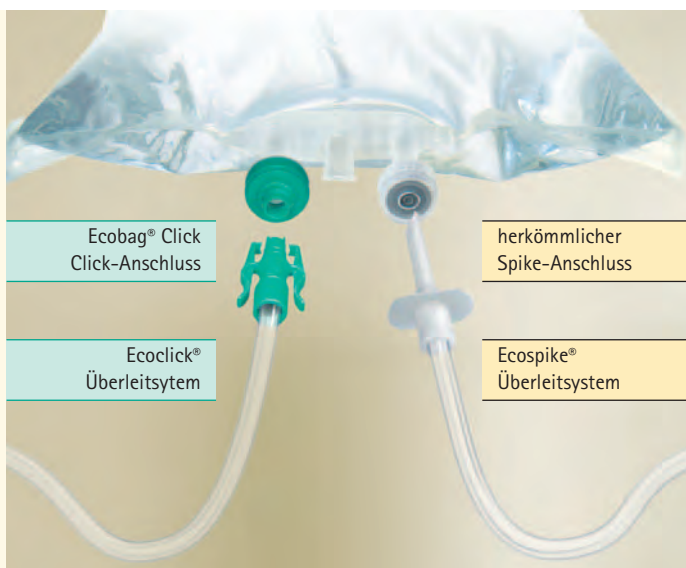

### ■ Ecobag® Click ist universell einsetzbar

Ein Beutel, zwei Alternativen – durch das Doppelporssystem ist Ecobag® Click auch mit allen herkömmlichen Dornanschlüssen und Überleitsystemen kompatibel

# Sicher Spülen mit dem B. Braun-System

Das Spüllösungsprogramm in  
Ecobag® click, Ecolav® und Ecotainer®



| Ecolav®                  |          |  | NaCl 0,9% |         | Ringer-Lactat |         | Aqua   |         |
|--------------------------|----------|--|-----------|---------|---------------|---------|--------|---------|
| Größe                    |          |  | REF       | PZN     | REF           | PZN     | REF    | PZN     |
| 100 x                    | 30 ml    |  | 404784    | 0201537 | 444994        | 3419047 |        |         |
| 20 x                     | 100 ml   |  | 387865    | 0201632 | 444995        | 3419053 | 387872 | 0202608 |
| 20 x                     | 250 ml   |  | 387867    | 0201810 |               |         | 387873 | 0202614 |
| 10 x                     | 500 ml   |  | 387868    | 0201833 | 387870        | 0202643 | 387874 | 0202620 |
| 10 x                     | 1.000 ml |  | 387869    | 0202212 |               |         | 387875 | 0202637 |
| Estericlean® 10 x 500 ml |          |  | 387866    | 0202554 |               |         |        |         |



| Ecotainer® |          |  | NaCl 0,9% |         | Ringer |         | Aqua   |         |
|------------|----------|--|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Größe      |          |  | REF       | PZN     | REF    | PZN     | REF    | PZN     |
| 10 x       | 500 ml   |  | 81645E    | 0088779 | 82490E | 0089046 | 82423E | 0088986 |
| 6 x        | 1.000 ml |  | 82489E    | 0089017 | 82491E | 0089052 | 82479E | 0088992 |



| Ecobag® Click |          |  | NaCl 0,9% |         | Ringer  |         | Glycine 1,5%         |         |
|---------------|----------|--|-----------|---------|---------|---------|----------------------|---------|
| Größe         |          |  | REF       | PZN     | REF     | PZN     | REF                  | PZN     |
| 4 x           | 3.000 ml |  | FR99930   | 0498224 | FR99944 | 0498543 | FR99934              | 0498336 |
| 2 x           | 5.000 ml |  | FR99970   | 0498230 | FR99984 | 0498566 | FR99974              | 0498342 |
| Größe         |          |  |           |         |         |         | Sorbitol/Mannitol 3% |         |
| 4 x           | 3.000 ml |  |           |         |         |         | FR99938              | 0498419 |
| 2 x           | 5.000 ml |  |           |         |         |         | FR99978              | 0498425 |

| Ecobag® Click           |  |  | Überleitsysteme mit Click Anschluss |         |  | Überleitsysteme mit Spike Anschluss |         |         |
|-------------------------|--|--|-------------------------------------|---------|--|-------------------------------------|---------|---------|
| Typ (je 25 Stück)       |  |  | REF                                 | PZN     |  | Typ (je 25 Stück)                   | REF     | PZN     |
| Ecoclick® Nr. 1         |  |  | 2112269                             | 0498632 |  | Ecospike® Nr. 1                     | 2112268 | 0498603 |
| Ecoclick® Nr. 2         |  |  | 2112271                             | 0498649 |  | Ecospike® Nr. 2                     | 2112270 | 0498626 |
| Ecoclick® Nr. 4         |  |  | 2112272                             | 1795734 |  | Ecospike® Nr. 4                     | 3806073 | 0949974 |
| Ecoclick® Arthros Nr. 1 |  |  | 2112277                             | 0498572 |  | Ecospike® Arthros Nr. 1             | 3804003 | 7479661 |
| Ecoclick® Arthros Nr. 2 |  |  | 2112279                             | 0498589 |  | Ecospike® Arthros Nr. 2             | 2112278 | 0498595 |

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun Melsungen AG  
OPM

Carl-Braun-Str. 1  
D-34212 Melsungen  
Tel (0 56 61) 71-33 99  
Fax (0 56 61) 71-35 50

[www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)