

COLD+HOT Mehrfachkompresse

- Bewährt in Klinik und Praxis
- Tiefgefrierfähig
- Extreme Haltbarkeit
- Auch für die häusliche Anwendung

Anwendungsbereiche:

Physiotherapie, Sportmedizin, Orthopädie, Gynäkologie, Zahnmedizin, Erste Hilfe, Postoperative Therapie

Anwendung Kältekompressse:

Ca. 2 Stunden ins Gefrierfach oder in die Kühltruhe (bis -18°C) legen - danach ist sie gebrauchsfertig.

Die Kompressse vor dem Auflegen in ein dünnes Tuch o.ä. einschlagen.

Kältekompressse nicht anwenden bei arteriellen Durchblutungsstörungen oder Raynaud-Syndrom.

Gegenanzeige: bei starken Kreislaufbeschwerden den Arzt befragen!

Anwendung Wärmekompressse:

Ca. 6 Minuten in bis zu 80°C heißes Wasser legen – danach gebrauchsfertig.

Die Kompressse vor dem Auflegen in ein dünnes Tuch o.ä. einschlagen.

Inhalt: 1 Stück

Größe: 12 x 29 cm

PZN 06967542